



- Beskytter mot allergener, virus og bakterier
- Væskebestandig
- Komfortabel passform
- Ekstra myke og behagelige ørestriker som er testet for høy strekkbelastning
- Fleksibel, en størrelse passer alle
- EN14683:2019 + AC:2019 godkjent
- CE merket
- TÜV godkjent

M+G Munnbind IIR er et høykvalitets usterilt 3-lags kirurgisk munnbind.

Munnbindene er produsert i renrom av solid produsent med høy kvalitetssikring i alle ledd. Testrapportene kommer fra de mest anerkjente test-instituttene i Europa og Asia.

Munnbindet gir beskyttelse mot allergener, bakterier, virus og andre luftbårne partikler.

Ypperlig i alle dagligdage situasjoner på jobb og privat hvor det er vanskelig å opprettholde sosial distanse.

**NB!** Kun til engangsbruk og bør ikke brukes i mer enn 4 timer. Trekk ut maskefoldene slik at masken dekker nese, munn og hake. Kontroller pakken før bruk og sjekk at den ikke er skadet eller forurenset. Kast maskene i henhold til retningslinjer for medisinsk avfallshåndtering etter bruk.



#### Bruksanvisning:



- 1) Brett ut munnbindet og fest ørestrikk til ørene. Nesebøylen skal vende opp.



- 2) Trekk munnbindet over nesen og under haken.



- 3) Klem nesebøylen over nese-ryggen for å minimere luftlekkasje.

#### Forpakning:

Varenr	DEM2R
Antall pr boks	50 stk
Antall pr eske	12 bokser

#### Tekniske data:

Antall lag	3
Materiale	Ikke-vevd stoff (Non-woven)
Beskyttelsesgrad	98%
Steril	Ikke
Størrelse	17,5 x 9,5 cm
Lagres	Tørt (bør ikke utsettes for direkte sollys under lagring).

Vi kan ultra-renhet!